

肠道筛查 试剂盒 说明

肠道筛查测试的 工作原理

- 1 您使用此试剂盒采集粪便样本
- 2 您将样本放入信封寄回给我们（免邮费）
- 3 我们检测您的样本，让您知道您的结果。

需要帮助吗？

请拨打免费电话 **0800 924 432**。告诉我们您想使用的语言，然后我们可以安排工作人员用您的语言与您讨论肠道筛查问题。



National
Bowel
Screening
Programme


如何使用试剂盒



重要信息

从**同意书**剥下一张条形码贴纸，然后粘在管子的平面上。


在**同意书**上写上您做检测的日期。填写表格的其余部分。

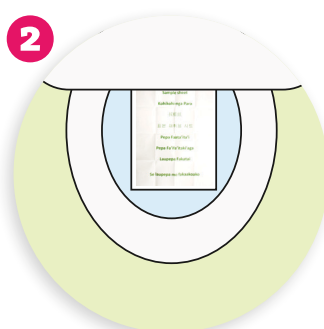

如果能做到的话，排尿（小便）然后冲马桶。


在马桶里放一些卫生纸。

将**采样纸**放在卫生纸上。

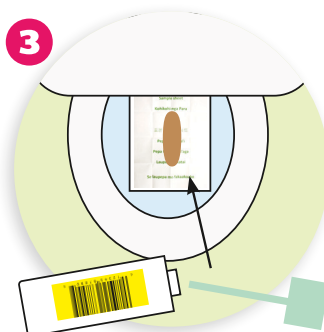


在采样纸上排便。

在粪便下沉之前快速拧开管盖。使用**绿色的小棒**，在**大便的不同位置**采样。直到小棒的顶端沾满大便。您只需要采集一个很小的样本。

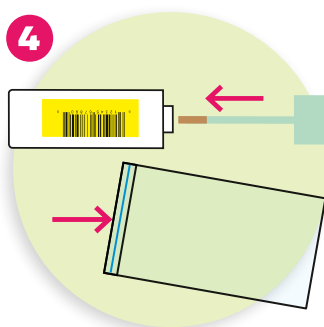

把棒子放回管子里。压下盖子**封好**管子。样品管中有一些透明液体。冲马桶并洗手。样品纸可以冲入马桶。将管子放入**拉链袋**中。挤压**拉链锁**以密封。

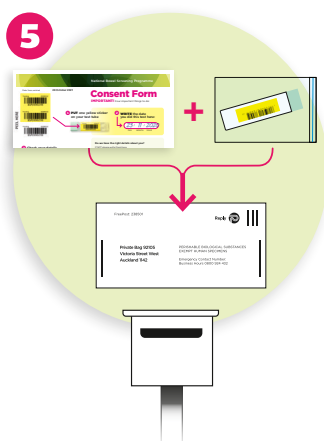

将带**管子**的**拉链袋**和**同意书**一起放入回邮信封中。将样本在测试当天或第二天寄回，因为时间拖延可能会破坏您的样本。